


Teste de Elevação Passiva da Perna Desafio de Fluido Sem Infusão


1) SELECIONAR TESTE

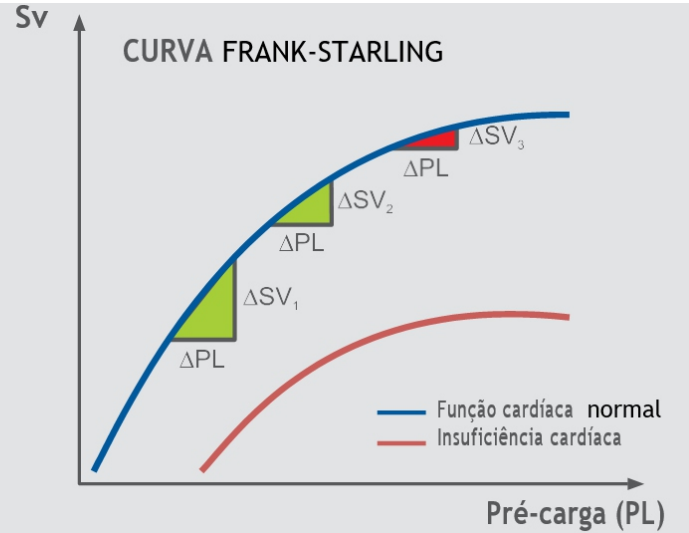

» Inicie a medição do ICG » Pressione "Measure..." botão »
Selecione "Teste passivo de elevação da perna"



2) REALIZAR A MEDIÇÃO

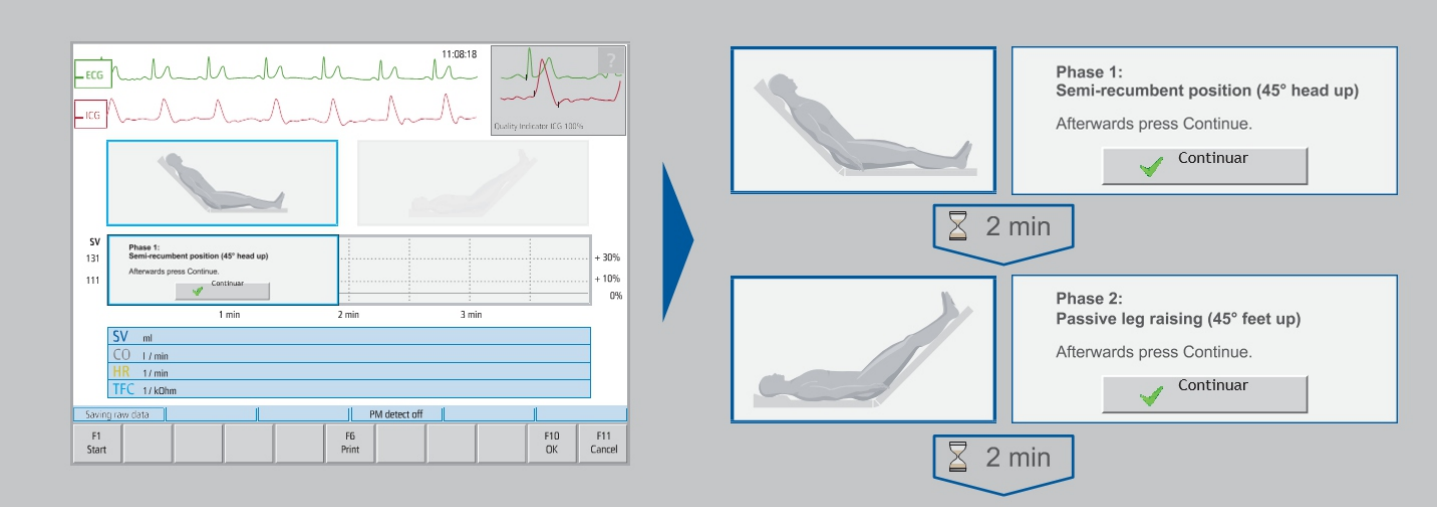


Phase 1:
Semi-recumbent position (45° head up)
Afterwards press Continue.

Phase 2:
Passive leg raising (45° feet up)
Afterwards press Continue.

2 min

2 min


3) OBTER RESULTADOS

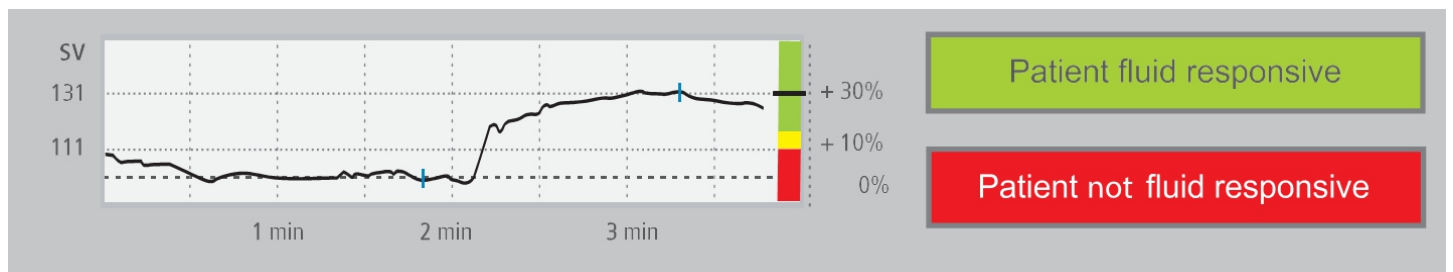

Referências:

Monnet X, Richard C, Teboul JL. Elevação passiva da perna. Medicina intensiva, Vol. 34, Edição 4, 2008

4) GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA

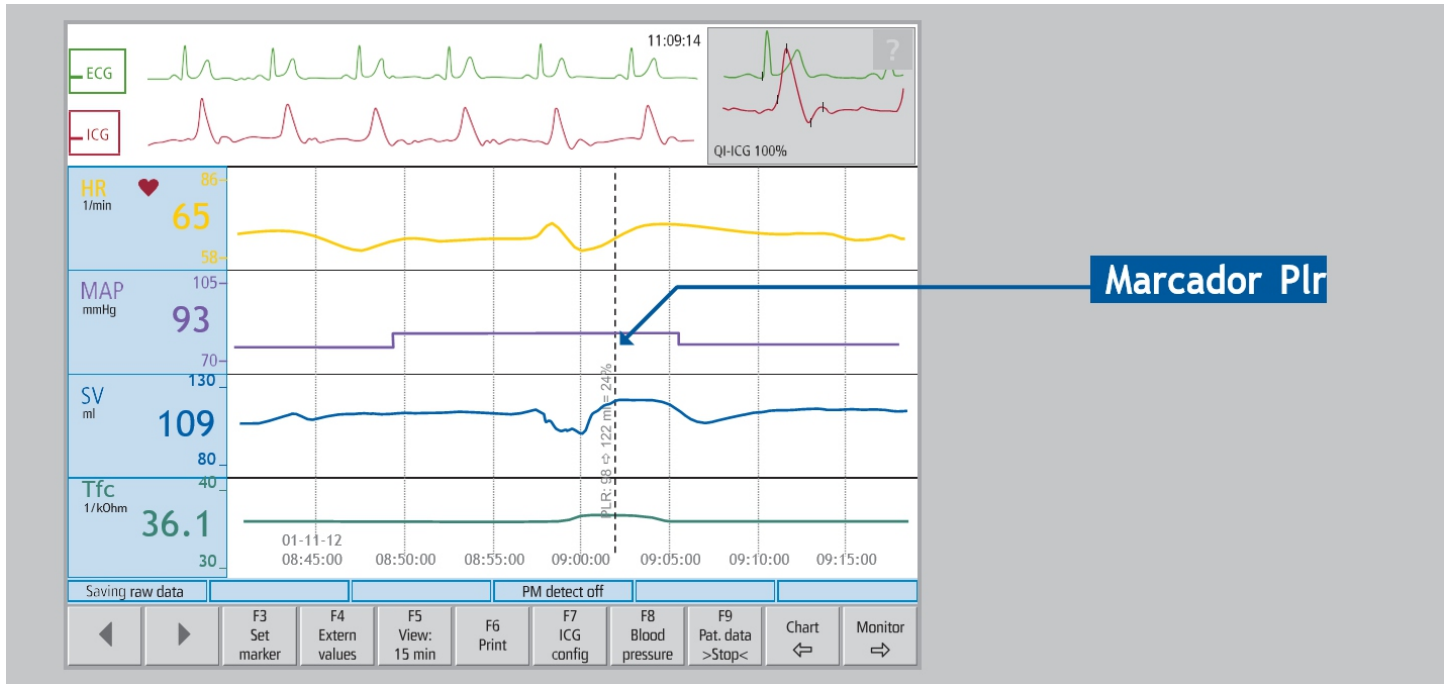

5) DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA

